



Chamber Protect

MELAG set di pulizia per la camera dell'autoclave

Pulizia affidabile e protezione a lungo termine che lascia la vostra autoclave splendente: Il nuovo set per la pulizia della camera MELAG rimuove anche lo sporco non visibile ad occhio nudo e preserva così la camera dalla decolorazione e dai depositi. Approfittate del set di pulizia Chamber Protect quando pulite la camera e i vassoi una volta alla settimana:


- ✓ Potente detergente con 50 panni senza lanugine e 1 panno in microfibra
- ✓ Particolarmente delicato sul materiale della camera e della guarnizione della porta
- ✓ Approvato attraverso approfonditi test di compatibilità dei materiali
- ✓ Ideale per tutte le autoclavi MELAG



Codice Articolo: ME01081



A voi la scelta:

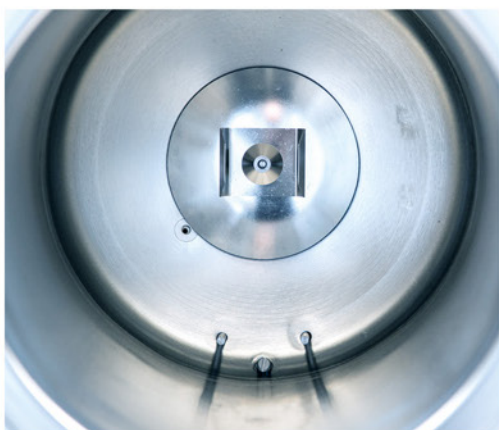

Con l'uso regolare di
Chamber Protect



Senza pulizia regolare
della camera

Step by step per raggiungere il risultato perfetto:

Per una protezione a lungo termine e una lucentezza duratura, procedere con il set di pulizia della camera una volta alla settimana:



1. Applicare Chamber Protect

Aprire la porta dell'autoclave, spegnere il dispositivo e lasciarlo raffreddare. Applicare circa 2 spruzzi di Chamber Protect all'interno della porta e circa 15 spruzzi nella camera.


2. Distribuire Chamber Protect

Distribuire il detergente su tutta la superficie di acciaio inossidabile con uno dei panni monouso. Lasciare agire Chamber Protect per circa 3 minuti.



3. Pulire la superficie in acciaio della camera

Inumidire un nuovo panno monouso e la camera con acqua demineralizzata. Strofinare la camera precedentemente deteresa con il panno e lasciare agire per circa 5 minuti.

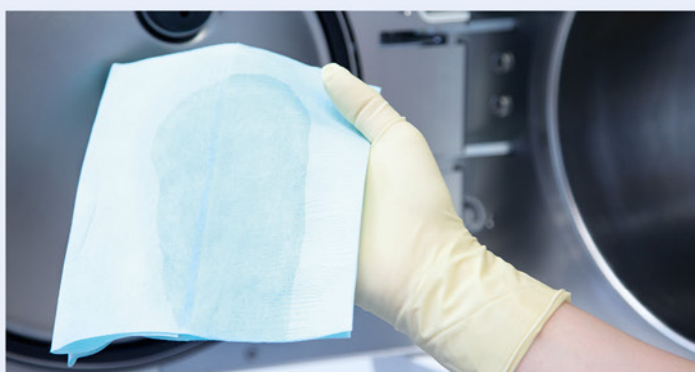

4. Asciugare la superficie in acciaio della camera

Infine, asciugare con cura l'interno della porta e l'intera camera con il panno in microfibra blu. L'autoclave è ora di nuovo disponibile per la sterilizzazione degli strumenti!



Per ulteriori informazioni:
www.melag.com

MELAG
competence in hygiene